

# 取扱説明書

## マツヨシ注射台



この度は当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。  
安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくお使いください。  
お読みいただいた後はお手元に保管してください。

こちらのQRコードからも  
組立動画をご覧いただけます。



### 「パーツ品の確認」

当製品には下記の部品が同梱されています。不足がないこと、破損など異常がないことをご確認ください。

※不足品や不具合などがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。



### 「製品の仕様」

品名 : マツヨシ注射台  
カタログコード : 25-4057-00  
品番 : MY-TC0001  
カラー : ブルー  
材質 : フレーム=ステンレス(SUS304)、枕部=ビニールレザー  
寸法 : 約W470×D470×H650~1050mm(本体), W240×D160×H60mm(枕部)  
重量 : 約6.0kg  
原産国 : 中国

※ご用意いただく工具 : プラスドライバー



【発売元】

 松吉医科器械株式会社  
<https://www.matsuyoshi.co.jp>


本社 : 〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階  
TEL : 03-5816-8819 (音声ガイダンス)  
E-Mail : [info@matsuyoshi.co.jp](mailto:info@matsuyoshi.co.jp)

## 組立方法

※プラスドライバーをご用意ください。

※ネジ・グリップノブの必要以上の締め過ぎにご注意ください。破損・ケガ等の原因となります。


### ステップ 1

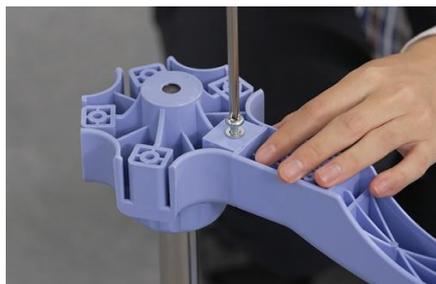

肢台を逆さにし、脚部を左画のように5本すべて取り付けます。

※ワッシャーをネジに通してから締めてください


### ステップ 2

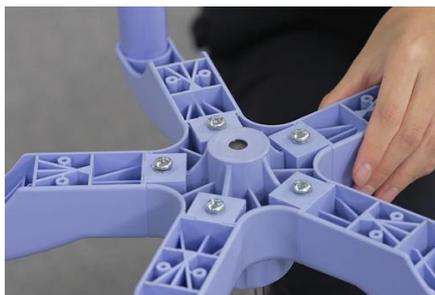

すべてのネジを締め終えたら、再び逆さにし位置を戻し、枕部を肢台にはめ込み、組立完了です。

### 高さ調節方法

固定グリップ

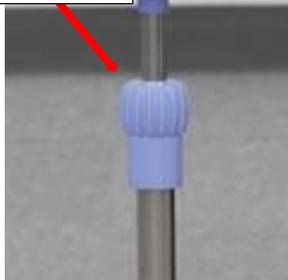

①固定グリップをまわし、ある程度緩めたら必要な高さに調節します。

②高さが決まったら、固定グリップを締めます。

③枕部に上から軽く力をかけ、ポールの高さが変わらないことを確認したら完成です。

※ポールの高さが変わってしまった場合は固定グリップの締めが甘いため、もう一度締めてください。

### ⚠ 安全上のご注意

- 使用前に各部の点検をし、破損や変形、グラつきなど異常がある場合には使用しないでください。
- 平らな場所でご使用ください。凸凹のある不安定な場所に置くと、転倒の可能性があります。
- 本製品に過大な力をかける等、本来の目的以外の使い方はしないでください。破損やケガの原因となります。
- 本製品の分解や改造はおやめください。事故や故障の原因になります。
- 当社指定の組立部品以外の組合せで使用しないでください。

### お手入れ方法

本製品をご使用後はアルコールで湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。