



# マツヨシ スライディンググローブ

MY-MS002GG



## 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。  
この取扱説明書には、お客様が安全にご使用して頂くために必要な注意事項や、正しい使い方が記載されております。ご使用前には、必ずお読みください。  
なお、内容の確認がいつでもできるよう、取扱説明書は大切に保管してください。

### 安全上の注意

使用する前に、「安全上の注意」をよく読んで、正しくお使いください。  
※ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。

図記号の例	
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことや物的損害の発生が想定される内容を示します。
禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
強制	強制(必ず守ること)や指示を示します。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 1. ご使用上の注意

#### 注意

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本来の目的以外に使用しないでください。</li> <li>2.火気の近くで本製品のご使用は、おやめください。本製品を装着したまま熱いものには触れないでください。火災や火傷、変形につながる恐れがあります。</li> <li>3.改造しないでください。強度や耐久性が低下し、思わぬ事故につながる恐れがあります。</li> <li>4.爪先や刃物などの鋭利な物で傷つけないようご注意ください。また、本製品を引っ掛けますと破損の原因につながります。</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.使用の際は、必ず被介助者の体の状態を確認してから使用してください。</li> <li>2.使用後は、本製品をベッド上や床に放置しないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。</li> </ol>

## 2. ご使用方法

体重のかかっている部分に手を差し込み、体を滑らせて使用します。



### ⚠ 注意

【ご使用前に】

- ❗必ず本製品が劣化や摩耗等していないかご確認ください。
- ❗グローブの奥までしっかりと腕を入れ、装着してください。

【横移動をする場合】

- ❗ベッド上で被介助者を移動させる場合、無理に一度で移動しないでください。
- ❗上半身から行い、次に下半身のように何度かに分け、被介助者の負担を軽減させてください。

【背上げ時の背抜きをする場合】

- ❗被介助者の上体を動かす際は、反動を使ったり、力任せに動かさないでください。

## 3. お手入れ方法

- ❗液温40℃以下にて、中性洗剤で手洗いしてください。  
ドライクリーニングや塩素系の漂白はしないでください。

## 4. 仕様

製品名	マツヨシ スライディンググローブ
品番	MY-MS0002GG
サイズ	W170×L480mm
重量	13g (1枚あたり)
材質	ナイロン

※製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

(発売元)

 松吉医科器械株式会社

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階

TEL: (03) 5816-8819 (音声ガイダンス)