

マイスコ点滴用保護ボード

取扱説明書

製品をご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただきから正しくご使用ください。

【注意事項】

- ◆「マイスコ点滴用保護ボード」は、点滴処置時に患者を保護するために使用される製品です。患者の動きをベルトで保護することで、スムーズな処置を行えると同時に、処置時の患者体位を楽に保てます。
- ◆医療施設における点滴処置時に、医療従事者の管理の下、正しくお使いください。点滴挿入部位や患者の状態に応じて、3通りの使用方法から選んでお使いください。

- ◆本製品を目的以外の用途では使用しないでください。
- ◆使用前には、必ず正常に機能するか確認してください。破れ・ほつれ・損傷が有る場合は、直ちに使用を中止してください。
- ◆お手入れの際は、各パーツごとに適切に行ってください。また、製品の状態に応じて、定期的な買い替えをおすすめします。

【マイスコ点滴用保護ボード MY-TK2000】

◆本体



◆構成品



- ①保護ボード×1コ(ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル) ステー×2本(塩化ビニール製)
- ②固定ベルト×2本(ポリエステル)
- ③クッション×1コ(ナイロン、ポリエチレンビーズ)

◆使用方法

① 前腕正中皮静脈 点滴時

クッションをにぎることで、楽な体勢で点滴を受けられます



② 手背静脈 点滴時

クッションを点滴挿入部下に入れることでAラインの確保が出来、楽な体勢で点滴を受けられます



③ 橈側皮静脈 点滴時

側部を点滴挿入部に選んだ際も、クッションをにぎることで楽な体勢で点滴を受けられます



【オプション:マイスコ 点滴用保護クッションのみ MY-TK2010(3コ入り)】



クッション×3コ(ナイロン、ポリエチレン)

※本体構成品に1コ含まれているクッションの交換用です。汚れに応じて、または患者毎にお取り替えください。

【洗濯方法】

洗濯:○ 脱水:○ 乾燥機:×

※保護ボードを洗濯する際は、塩化ビニール製のステーを2本抜き取ってから洗濯してください。

※固定ベルトは、面ファスナーを留めた状態で洗濯してください。

※洗濯する際は、洗濯ネットをご使用ください。

2015.7

【販売元】



松吉医科器械株式会社

<http://www.matsuyoshi.co.jp>

住所:東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

TEL:03-5816-8819(音声ガイダンス) FAX:0120-024432