


取扱説明書

- [ご使用の前に] △ 製品の安全確認をしてからご使用ください
 △ ご使用の前に必ずこの説明書をお読みの上、正しくお使いください

[各部名称・組立て]

- ①主柱(上段・中段・下段)計3本 ②ベース台(主柱取付ネジ x 3本・セット済) ③カーソル(遊標)
 ④主柱三段取付ネジ M3 x 2本 ⑤ベース台取付ネジ M8 x 3本 ⑥付属:M8 専用レンチ

1. 予め台にセット済⑤ネジ x 3本を⑥レンチで外し、下図の様に主柱下段#3(フック付)を取付けます

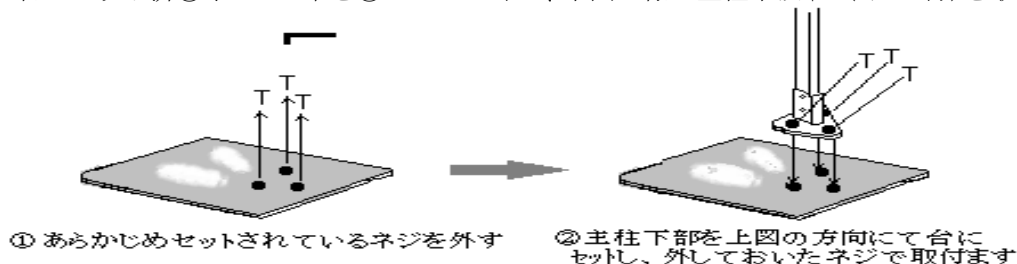


2. 主柱下段#3に主柱中段#2を右図の様に挿し込み、取付け、④主柱三段取付ネジ M3にて仮止めします



- △ 方向注意: 主柱#2の目盛は正面から向かって右側です

3. 主柱中段#2に主柱上段#1を右図の様に挿し込み、取付け、④主柱三段取付ネジ M3にて仮止めします

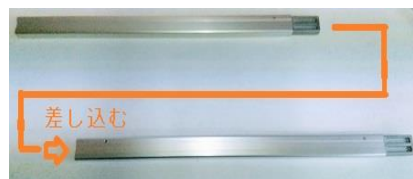

- △ 方向注意: 主柱#1の目盛は正面から向かって右側です

4. 仮止めした各主柱ジョイント部の④取付ネジ M3を締込み、次にカーソルを主柱トップから台側に向け右図の様に挿し込みセットして完成となります

- *各主柱の不要な着脱の繰り返しは厳禁(破損の原因となります)
- *カーソルのセット方向にご注意ください
- *カーソル移動時は先端を持たずに後方を掴む様にし、ゆっくりと上下させてください


- △ 使用しない時は接触破損等を防ぐ為、カーソルを外して保管をお願いします



[測定方法]

- ・ あらかじめカーソルを上方へ移動させます
- ・ 主柱を背に背筋を伸ばし真っ直ぐ立ち顎を引きます (両足の踵は上げない)
- ・ 静かにカーソルを降ろし被験者の頭にのせます
- ・ 右図の様に読取ります

水平に見て、赤線と重なった数値を読取る

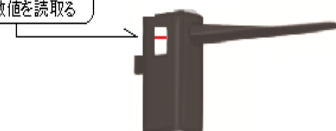

[使用上の注意]

- △ 転倒シケガをする恐れがありますので、平らな場所に設置し飛び乗ったり寄りかかったりしないで下さい
- △ セット完成後は破損や歪みの原因になる為、各主柱の付け外しは極力しないで下さい
- △ 故障の原因となりますので、移動の際に振り回したり落としたりぶついたりしないでください
- △ 主柱を持つての移動は故障の原因になりますので、移動時は必ずベース台を持つて移動してください
- △ 分解および改造行為は絶対におやめください。*保証対象外および修理不能の恐れがあります。
- △ 合板床材、塩ビ床材等に設置しないで下さい※非移行性ゴム脚でも床材により色移行の可能性があります)

[アフターサービスについて]

1. 修理、その他お問合せは本製品をお買い求め頂いた販売店にご連絡ください。
2. 本製品を正常にご使用いただいた上での保証期間はご購入後1年間となります。

[発売元]

松吉医科器械株式会社 〒113-8520 東京都文京区湯島 3-14-9 湯島ビル 3階
 URL : <https://www.matsuyoshi.co.jp/>